

DISPOSABLE VAGINAL SPECULUM / ESPÉCULO VAGINAL DESECHABLE

REF.: EPV-003 /004

El espéculo vaginal desechable está compuesto principalmente por una parte superior y una subparte de poliestireno (PS), así como por una varilla de ajuste de polietileno (PE). Este tipo de producto está fabricado con plástico polimérico no tóxico y está compuesto principalmente por un lóbulo superior, un lóbulo inferior y un eje. Es esterilizado mediante óxido de etileno - no tóxico.




PRODUCTO ESTÉRIL

TALLA	PRESENTACIÓN INDIVIDUAL	PRESENTACIÓN CAJA MÁSTER
Small / Medium	1 unidad	100 unidades



DIMENSIONES

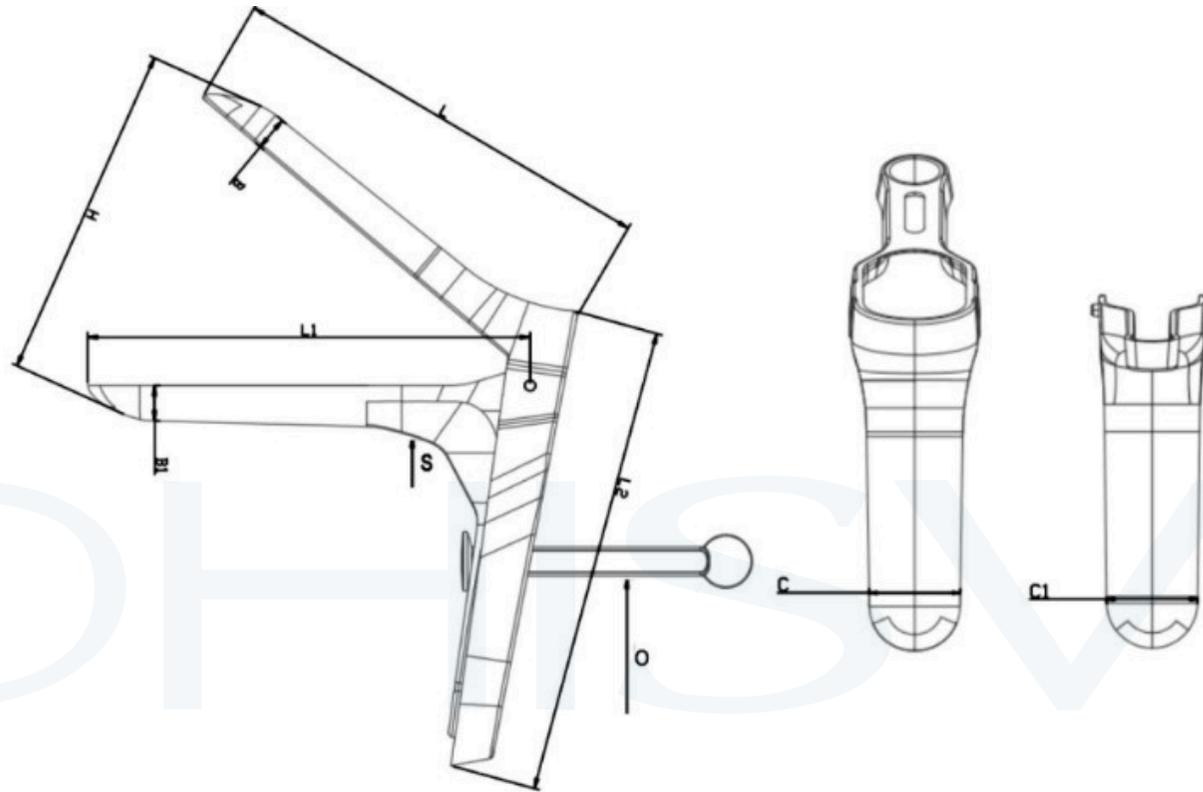

TALLA	DIMENSIONES BÁSICAS							
	L	L1	L2	B	B1	C	C1	H
M	108.5 (+/-1)	108 (+/-1)	116.5 (+/-2)	9.2 (+/-0.5)	9.2 (+/-0.5)	26.5 (+/-0.5)	26.5 (+/-0.5)	82 (+/-3)
S	108.5 (+/-1)	108 (+/-1)	116.5 (+/-2)	9.2 (+/-0.5)	9.2 (+/-0.5)	24.2 (+/-0.5)	24.2 (+/-0.5)	81.5(+/-3)

MATERIALES:

- Fabricados con material de poliestireno conforme a la norma GB/T12671-2008.

EMPAQUE:

- Envase primario:
Funda de polietileno
1 UNIDAD X FUNDA

PRESENTACIÓN:

- Envase secundario:
Caja de cartón
100 UNIDADES X CAJA

APLICACIONES:

- **Uso:** Se utiliza ampliamente para exámenes vaginales y tratamientos, ayudando a evitar infecciones cruzadas y enfermedades de transmisión sexual de forma eficaz.



SEGURIDAD DE USO:

- La selección de la especificación la determinan y operan los médicos especialistas.
- Verifique que el empaque primario esté sellado antes de usarlo, luego ábralo desde el lugar indicado para facilitar la apertura.
- La vigencia de la esterilización es de cinco años; el uso de productos vencidos está prohibido.
- No utilice el producto si el empaque está dañado o si los accesorios están sueltos.
- El producto es de un solo uso y debe desecharse después de usarse.
- Está prohibido su reutilización y re-esterilización.
- Almacene en un lugar seco, fresco y limpio. No aplastar.

INSTRUCCIONES DE USO:

- Verifique que el empaque primario esté sellado antes de usarlo, luego ábralo siguiendo la muesca.
- Inserte el extremo frontal del espéculo en la vagina y, a continuación, use la varilla de ajuste para colocar el espéculo en la posición adecuada para la inspección.
- El producto debe desecharse después de su uso.
- Al usar el espéculo, el ajuste y la expansión de cada engranaje deben ser flexibles, sin presentar bloqueos.
- Cuando las hojas superior e inferior del espéculo están bajo presión, cada posición de operación debe mantenerse estable y no deslizarse hacia atrás de forma natural.